



Pharmanova Pen Needle-pennkanyl

- Kanylen har slipats och silikoniserats för att göra injiceringen behagligare och mindre smärtsam.
- Kanylerna är tydligt färgkodade enligt storlek, vilket gör det enkelt att identifiera produkten.
- Kanylerna passar på de flesta av de vanligaste insulinpennorna på marknaden.
- Det finns sex storlekar att välja mellan.



Så väljer du en lämplig pennkanyl

Längd – så kort kanyl som möjligt

Vi rekommenderar att du använder så korta kanyler som möjligt. Undersökningar visar att en kortare kanyl minskar risken att kanylen i misstag sticks in i en muskel. Det är dessutom betydligt lättare att injicera med en 8 mm eller kortare kanyl, eftersom du då kan sticka in kanylen i 90 graders vinkel i stället för 45 graders vinkel och du inte behöver lyfta upp ett hudveck för att injicera (gäller inte barn och personer som har ett tunt lager underhudsfett).

Diameter – lämpligt grov kanyl

Välj en lämpligt grov kanyl för att garantera en så smärtfri injicering som möjligt. Ju mindre kanylens diameter är, desto mindre kanyl behöver du trycka genom huden och desto mindre känner du av sticket. Det uppstår dessutom mindre förhårdnader när du använder en kanyl med mindre diameter.

Storleksrekommendationer för en typisk användare:

4 mm 32G	Barn eller vuxna som har ett mycket tunt lager underhudsfett samt stickkänsliga patienter
5 mm 31G	Barn eller vuxna som har ett tunt lager underhudsfett
6/8 mm 31G	Diabetiker som har ett mellantjockt lager underhudsfett
8 mm 30G	Diabetiker med en stor mängd insulin



Engångsbruk och säkerhet

För att garantera din säkerhet är pennkanylerna sterila och avsedda för engångsbruk. Spetsen på en använd kanyl kan vara böjd och trubbig och kan orsaka blåmärken, ärr på huden och infektioner. De nya pennkanylerna är silikoniserade, vilket gör injiceringen behagligare.

För att garantera en så smärtfri injicering som möjligt bör du använda en ny pennkanyl varje gång.



Rätt injektionsteknik

1. Lyft upp ett hudveck med hjälp av 2–3 fingrar.
2. Stick in kanylen i huden i 45–90 graders vinkel beroende på kanylens längd och hur tjock fettvävnad du har under huden.
3. Injicera insulinet i lugn takt.
4. Tryck långsamt in knappen helt medan du räknar till tio.
5. Vänta tio sekunder innan du drar ut kanylen.
6. Släpp hudvecket.



Lämpliga insulinpennor

Pharmanova Pen Needle kan användas med följande insulinpennor:

B.Braun Omnican Pen	Haselmeier DiaPen
Becton Dickinson BD Pen 1.5ml	Novo Nordisk ReliOn InnoLet, NovoPen 1,5ml, NovoPen 3,0ml, NovoLog FlexPen
Berlin Chemie BerliPen	
Eli Lilly Humulin Pen, Humalog Pen	
	Owen Mumford AutoPen
	Sanofi Aventis Sanofi Aventis Pen

Pharmanova Pen Needle – sex storlekar.

	Produktnr	Kanylstorlek	Förpackning
	I23204	32G (0,23 mm) x 4 mm	100 st.
	I23105	31G (0,25 mm) x 5 mm	100 st.
	I23106	31G (0,25 mm) x 6 mm	100 st.
	I23108	31G (0,25 mm) x 8 mm	100 st.
	I23008	30G (0,30 mm) x 8 mm	100 st.
	I22912	29G (0,33 mm) x 12 mm	100 st.