



Pharmanova Pen Needle-kynäneula

- Neulan hionta ja silikonointi mahdollistavat miellyttävämmän ja kivuttomamman pistämisen
- Erikokoiset neulat on selkeästi merkitty eri väreillä helpottaen tuotteen tunnistamista
- Neuloja voidaan käyttää useimmissa yleisimmin käytössä olevissa insuliinikynissä
- Kuusi kokovaihtoehtoa



Kuinka valitset sopivan kynäneulan.

Pituus – mahdollisimman lyhyt neula.

On suositeltavaa käyttää mahdollisimman lyhyitä neuloja, sillä tutkimusten mukaan lyhyempi neula pienentää lihaksensisäisen pistämisen riskiä. Lisäksi 8 mm tai lyhyemmällä neulalla pistäminen on huomattavasti helpompaa, sillä pistämisen voi tehdä 90 asteen kulmassa 45 asteen kulman sijaan eikä ihoa tarvitse kohottaa poimulle pistettäessä (pois lukien lapset ja henkilöt, joilla on vähän ihonalaista rasvakudosta).

Halkaisija – sopivan paksuinen neula.

Sopivan paksuinen neula takaa mahdollisimman kivuttoman pistämisen. Mitä pienempi neulan halkaisija on, sitä vähemmän neulaa tarvitsee painaa ihon läpi ja sitä vähemmän pistos tuntuu. Myös kovettumia syntyy vähemmän pistettäessä halkaisijaltaan pienemmällä neulalla.

Kokosuositukset tyypilliselle käyttäjälle:

4 mm 32G	Lapset tai aikuiset, joilla erittäin vähän ihonalaista rasvakudosta sekä pistosherkät potilaat
5 mm 31G	Lapset tai aikuiset, joilla vähän ihonalaista rasvakudosta
6/8 mm 31G	Diabeetikot, joilla vähäistä enemmän ihonalaista rasvakudosta
8 mm 30G	Diabeetikot, joilla suuri insuliinimäärä



Kertakäyttöisyys ja turvallisuus.


Turvallisuutesi takaamiseksi kynäneulat ovat steriilejä ja kertakäyttöisiä. Uudelleenkäytetyn neulan kärki voi olla taipunut ja tylsynyt sekä se saattaa aiheuttaa mustelmia, ihon arpeutumista ja infektioita. Lisäksi uusissa kynäneuloissa oleva silikonointi mahdollistaa miellyttävämmän pistoksen.

Varmistaaksesi mahdollisimman kivuttoman pistämisen käytä joka käyttökerralla uutta kynäneulaa.



Oikea pistostekniikka.

1. Purista iho poimulle kapealla otteella 2-3 sormella.
2. Vie neula ihon alle 45–90 asteen kulmassa neulan pituuden ja ihonalaisen rasvakudoksen paksuuden mukaan.
3. Annostelee insuliinia rauhallisesti.
4. Paina painonappi hitaasti pohjaan asti laskiessasi samalla kymmeneen.
5. Odota kymmenen sekuntia ennen kuin vedät neulan pois ihosta.
6. Päästä irti ihopoimusta.

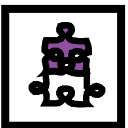

Yhteensopivuus.

Pharmanova Pen Needle-kynäneulat on todettu yhteensopiviksi seuraavien insuliinikynien kanssa:

B.Braun Omnican Pen	Haselmeier DiaPen
Becton Dickinson BD Pen 1.5ml	Novo Nordisk ReliOn InnoLet, NovoPen 1.5ml, NovoPen 3.0ml, NovoLog FlexPen
Berlin Chemie BerliPen	
Eli Lilly Humulin Pen, Humalog Pen	Owen Mumford AutoPen
	Sanofi Aventis Sanofi Aventis Pen

Pharmanova Pen Needle – kuusi kokovaihtoehtoa.

	Tuotenumero	Neulan koko	Pakkauskoko
	I23204	32G (0,23 mm) x 4 mm	100 kpl
	I23105	31G (0,25 mm) x 5 mm	100 kpl
	I23106	31G (0,25 mm) x 6 mm	100 kpl
	I23108	31G (0,25 mm) x 8 mm	100 kpl
	I23008	30G (0,30 mm) x 8 mm	100 kpl
	I22912	29G (0,33 mm) x 12 mm	100 kpl